


Neuvorstellung: TopJet clix

Aktivierung und Deaktivierung in Sekundenschnelle
hygienisch und komfortabel
präzise und betriebsicher

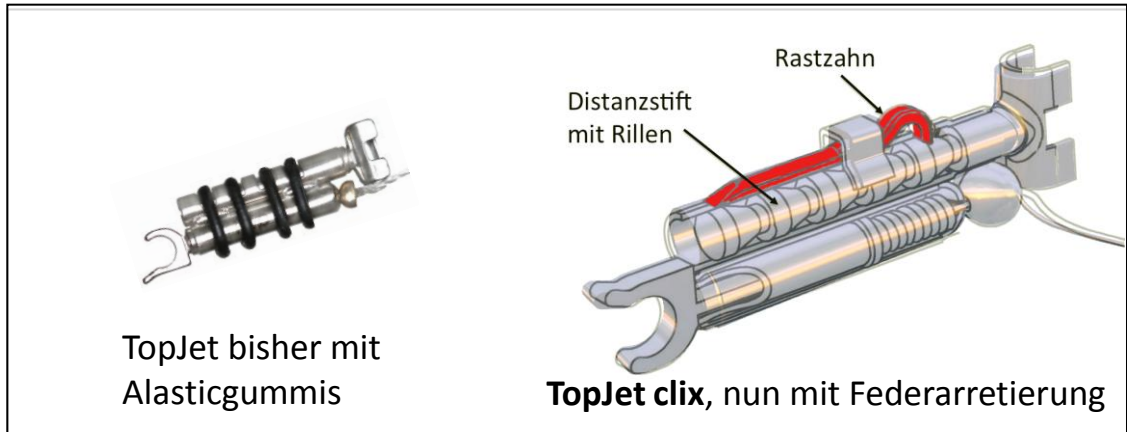

Sehr geehrte TopJet Anwenderin!
Sehr geehrter TopJet Anwender!

Es ist uns eine große Freude, Ihnen den **TopJet clix**, die überarbeitete Version des bewährten TopJet Molaren Distalizers vorzustellen. Einbau sowie Funktion des TopJets haben sich dabei nicht verändert. Wie Sie jedoch sofort erkennen werden, arbeitet diese Version ohne Alastikgummi. An deren Stelle ist ein Distanzstab getreten, der nach dem „Rastzahnprinzip“ arbeitet. Aktivierung und Deaktivierung sind damit deutlich einfacher. Statt bisher 4 Aktivierungsstufen gibt es nun 5 mit einem Hub von jeweils 1,6mm, die hörbar einrasten.



EINBAU DES TOPJET

Auch der Einbau ist vereinfacht, da der T-Connector nun leichtgängig mit der Fassspizette nach hinten ausgezogen werden kann. Ist der Distanzstift versehentlich zu weit ausgefahren? Durch einfaches Einlegen einer zahnärztlichen Häkchensonde in die Öse des Rastzahns wird der Arretierungsmechanismus gelöst und das Distanzrohr kann auf diese Weise einfach wieder eingefahren werden.

DEAKTIVIERUNG

Nach dem Einbau des TopJet clix (Schließen des T-Connectors, Verkleiden des C-Clips und des T-Connectors mit Triad Gel) können Sie durch Anheben des Rastzahns (2) mit der zahnärztlichen Häkchensonde (1) das Doppelrohr nach hinten ausgleiten lassen. Dadurch kann sich die Druckfeder im TopJet bis in ihre Nullposition entspannen.



AKTIVIERUNG

Sie legen die Häkchensonde (1) in die distale Taille (3) des Doppelrohrs und ziehen dieses nach mesial. Sie haben nun die Wahl zwischen bis zu 5 Einraststufen zu je 1,6 Millimetern.



Sowohl Reaktivierung als auch Deaktivierung sind nun in Sekundenschnelle und leicht möglich. Der neue TopJet clix vereint Präzision, Betriebssicherheit und höchsten Komfort für Sie und Ihre Patienten.

Mit freundlichen Grüßen

Promedia A. Ahnfeldt GmbH

Marienhütte 15

57080 Siegen

Tel.: 0271 - 31 460-0

Fax: 0271 - 31 460-80

info@promedia-med.de

www.promedia-med.de